

Luminothérapie



Design unique permettant un transport et un rangement facile

Rouge : Rajeunissement de la peau

Bleu : soigne l'acné

Violet : prend soin de la peau et diminue l'acné

Infra-rouge : action plus profonde, relaxation, activation de la circulation sanguine, soulagement des douleurs

Conseils

- faire une séance de traitement de 20mn
- le patient doit porter des lunettes pendant le traitement
- nettoyer correctement l'appareil avant chaque utilisation
- des masques cosmétiques peuvent être utilisés pendant le traitement

Contres- indications et précautions

- ne pas utiliser en cas de maladie de la peau
- ne pas utiliser en cas d'hyper-sensibilité à la lumière ni lorsque la personne prend des médicaments augmentant la sensibilité aux ondes lumineuses
- éviter les traitements laser ou par autre machine une semaine avant et après le traitement
- éviter les bains de soleil et le sauna après le traitement

Utilisation :



Commandes



-  Rouge : 4 niveaux variables
-  Bleu : 4 niveaux variables
-  Violet : 4 niveaux variables
-  Infra rouge : 4 niveaux variables
-  Timer pour la durée du traitement
-  Début/Arrêt du traitement



Connecter au secteur et presser le bouton rouge pour mettre en marche l'appareil

Caractéristiques:

Puissance de sortie: 32W

Source de lumière: pulsation de lumière de photo de LED

Longueur d'onde de lumière: Lumière rouge - 640nm, lumière bleue - 423nm, lumière d'IR - 830nm

Tubes Led: 290 pcs

Matériau de la coque: PC

Opération Modulation: Rouge, Bleu, Couleur IR

Réglage de l'heure: 5-60 minutes

Mode de contrôle: contrôle numérique

Tension de travail: DC 12V 3A

Tension d'entrée: AC100-240V

Dimensions: 473 (W) * 484 (D) * 343 (H) mm

Poids: G.W - 4.5Kg / N.W - 2.29Kg